


サライバクリア

Saliva Clear

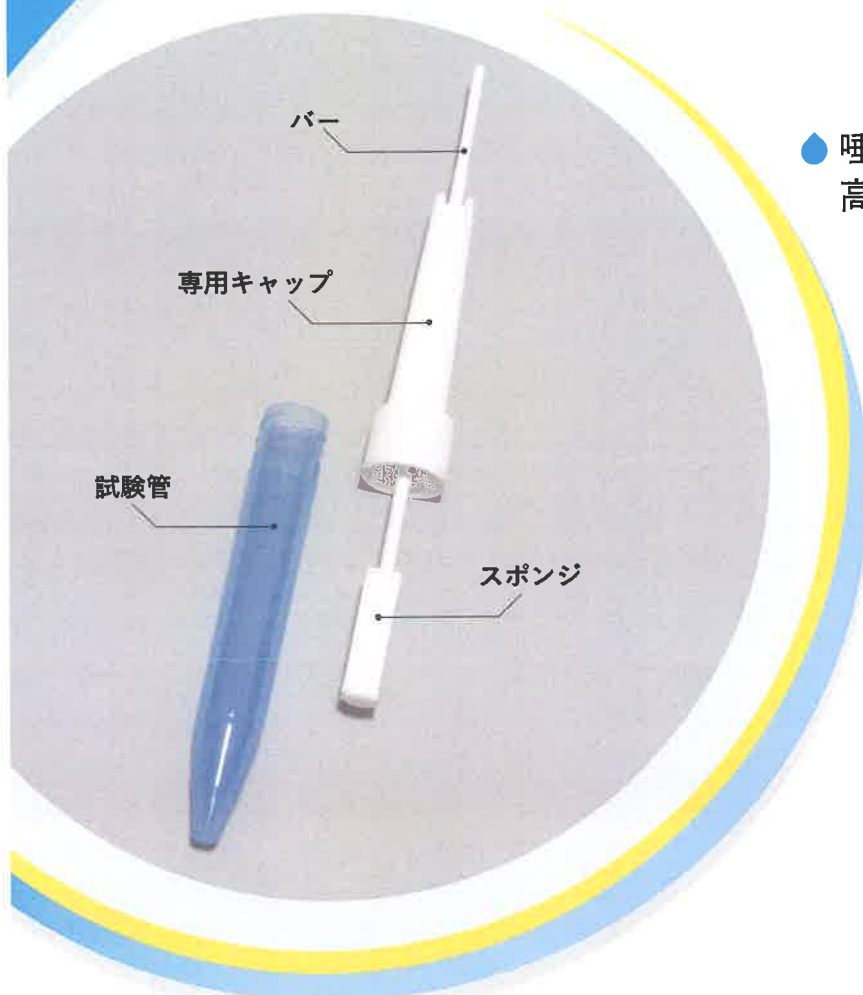

- 唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。
- 操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。
- 専用キャップを締めてバーを上引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- ・ 再使用禁止
- ・ 麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと

サライバクリアは、手軽で迅速に良質な唾液を採取できる医療機器です。

■ 製造販売届出番号・製品コード・包装単位等

製品名	サライバクリア
製造販売届出番号	12B3X10027000101
製品コード	TZ4000
包装単位	500 キット / 箱
保管方法	直射日光と衝撃を避け、5~30℃で保管すること



ご使用の際は、本品の袋に記載の採取方法及び本品の「添付文書」を必ずご参照ください。



販売元

栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木143番地



製造販売元

株式会社臨床検査器材

〒270-0176 千葉県流山市加 1-6-2


5134 AMK
2021年5月作成

新唾液採取キット

サライバクリア

Saliva Clear

唾液
約5分
自己採取

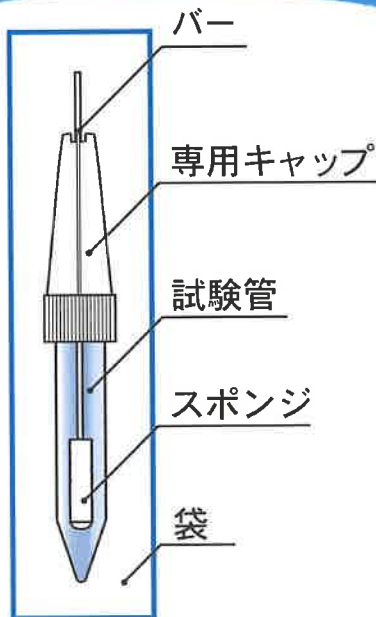

特徴

- あめ玉のように唾液分泌を刺激する
- 試験管へ直接採取できる
- 唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジです
- バーの先のスポンジをあめ玉を舐めるように採取する
 - └ マスクしたまま OK
 - └ 飛まつしない
 - └ スポンジが柔らかくなれば採取 OK サイン
- バーを引っ張りスポンジを圧縮して採取する
 - └ 約 1ml 採取できる
 - └ バーが切断できコンパクトになる

操作手順

1

袋を開封しキャップを回して取り外す

注意
採取部には絶対に手で触れないで下さい！

2

スポンジをあめ玉のように舐める

マスクをしたままでも OK!

3

スポンジが柔らかくなれば試験管にキャップを戻してしっかりと閉める

※しっかりとキャップをネジ止め

4

凹みが見えるまでバーを引っ張り上げる

凹み
拡大図

※スポンジが柔らかくならないと凹みまで引っ張る事ができません

この位置以上に取って下さい。

取れない場合はバーを戻して、②からやり直してください

図の位置まで取れた場合は⑤に進んでください

約1ml

5

左右に曲げればバーが折れる

※機能上バーに機体は触れていません

提出